

Rettledning for utvida uttak av prøver til virologi og bakteriologi fra moskus ved utbrudd av lungebetennelse

Virologi – svaberprøver:

- To vevsprøver og tre svaberprøver per dyr:
 - Legg to dype snitt med kniv i to ulike områder av lungene: Ett hvor lungen er fast og mørkt misfarget (som oftest i fremre deler av lungene), og ett hvor lungen ser mer normal ut (som regel bakre del).
 - Ta ut en liten vevsprøve ca. en halv sukkerbit stor (ikke større, må være 5-10x mer væske enn vev for å oppnå fiksering) fra hvert av de to områdene og legg dem på hvert sitt rør med klar væske. Skru korken passe til (gjengene kan ryke).
 - Finn et område på snittflatene (bronkier/hulrom) og stikk svaberen inn i lungevevet og vri godt rundt. En svaber per snittflate. Stikk de to svaberne ned i røret med rød væske og bryt dem av mot kanten på røret (svaberen er utstyrt med et svakt punkt nederst som gjør at den lett brekker). Skjær opp luftrøret og rull den tredje svaberen langs slimhinna nedover i luftrøret. Svaberen overføres til det samme prøverøret som de to andre svaberprøvene. Skru korken godt på.
- Merk prøveglassene med dyr nr. Legg de tre prøveglassene (klar væske x2, rød væske x1) i en felles pose og knytt godt igjen og legg den i lag med andre prøver i den ferdig frankerte konvolutten.

Bakteriologi – svaberprøver (prøvesett med svaber og svart kullmedium):

- To svabere per dyr: 1 svaberprøve fra lunge og 1 svaberprøve fra milt:
- Lunge:
 - Legg et dypt snitt med kniv i et område av lungen som er fast og mørkt misfarget (som oftest i fremre deler av lungene).
 - Svabre snittflaten og stikk svaberen inn i lungevevet og vri godt rundt.
 - Stikk svaberen inn i det medfølgende røret med sort materiale i bunnen.
 - Merk svaberen med «lunge» og dyr nr.
- Milt:
 - Legg et snitt der milten er på sitt tykkeste.
 - Svabre snittflaten og stikk svaberen inn i miltvevet og vri godt rundt.
 - Stikk svaberen inn i det medfølgende røret med sort materiale i bunnen.
 - Merk svaberen med «milt» og dyr nr.
- Legg de to svaberne i en felles pose og knytt godt igjen og legg den i lag med andre prøver i den ferdig frankerte konvolutten.

Blodprøve

- Sug opp blod (skutte dyr fra brysthule; nylig døde dyr fra hjerte eller store overskårne blodkar) med vedlagte plastsprøyte, og overfør blodet til plastrør med blå kork.
- Merk blodprøverøret med dyr nr. Legg blodprøven sammen med de andre prøvene.

Oppbevar prøvene kjølig frem til postforsendelse. Postforsendelse bør skje så raskt som mulig.

TAKK FOR INNSATSEN !

Kontaktpersoner:

Turid Vikøren (veterinær), tlf: 23 21 63 51, mob. 98 03 90 34

Kjell Handeland (fagansvarlig vilthelse) tlf. 23 21 63 50, mob. 95 72 62 62